


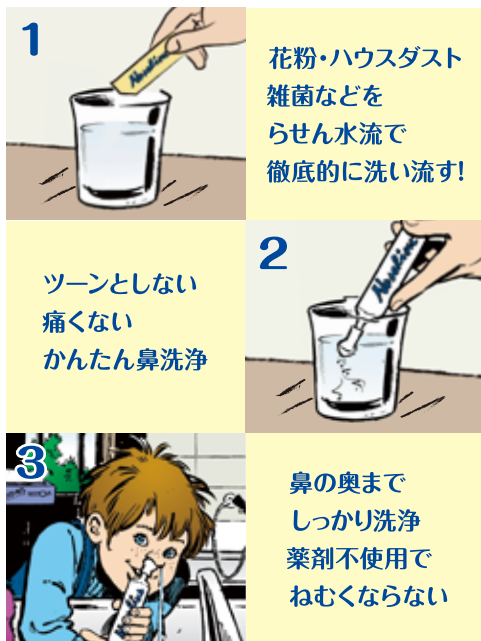

〈一般医療機器〉医療機器製造販売届出番号
13B1X10275000001

「ナサリン」とは?

「ナサリン」は、スウェーデンで開発された薬剤を使わない鼻腔洗浄器です(特許取得品)。「ナサリン」はご自宅でも使用できる医療機器です。特別な精製塩と水道水で簡単に作れるようにデザインされています。

なぜ「ナサリン」を使うの?

「ナサリン」は、特許を取得したシリコンチップによって穏やかな流れを作り、乾燥した鼻に潤いをあたえ、花粉・ハウスダスト・雑菌などの異物を優しく洗い流します。飛行機内の乾燥や煙草の煙による不快感への対策にもおすすめします。

「ナサリン」を使えるのは?

4歳以上で、中耳炎の方以外ならどなたでも「ナサリン」を使用することができます。お子様の使用に際しては、医師の指導のもと、もしくは大人の監督下でご使用ください。耳に疾患のある方や鼻の炎症がひどい方は「ナサリン」を使用する前に医師にご相談ください。また、大人が使いやすい「ナサリン」という大きいサイズもございます。

「ナサリン」の構造は?

柔らかいシリコンは鼻孔を密閉し、食塩水の漏れを防ぎます。それにより洋服を汚すことなく、鼻腔の奥まで洗浄できます。先端の中は砂時計の形状になっており、らせん水流を作ります。鼻の奥にやさしくあたり、ツーンとした痛みはありません。

取扱説明書

痛くないかんたん鼻洗浄



ご使用方法

①ぬるま湯に250mlに一包のナサリン精製塩を溶かします。

※ぬるま湯は体温と同等程度で、冷たすぎたり、熱すぎたりすることがないようにご注意ください。また、ナサリン精製塩をお勧めしますが、市販の食塩も使えます。その場合は濃度に注意してください。また、一般の食塩にはヨウ素、海藻、添加物などの異物が含有されている場合があります、鼻洗浄には向かないとされています。

②ナサリン本体に吸い上げます。

③「アー」と発声しながらゆっくりと鼻に注入します。

④洗浄後やさしく鼻をかんてください。

※洗浄後に頭を前に傾け左右にやさしく振ることにより、鼻に溜まった食塩水が取り除けます。ご使用の数時間後でも食塩だけでなく食塩水が流れ出ることがあります。

使用期間

○使用頻度により異なりますが、通常は4か月から6か月の使用期間となります。

保管

○先端シリコンチップ、注入器筒部、ピストン部分の3点を40度位のお湯で軽く洗い流します。ゴムが滑りにくくなるのを防ぐため、ふかずにそのまま注入器筒部に必ずピストン部分を戻してから自然乾燥してください。

○「ナサリン」は室温で乾燥した場所に保存してください。

○変色する場合がありますが、使用上には問題ありません。

注意

- 水道水か精製水をお使いください。やむなく井戸水を使用する場合は煮沸してお使いください。
- 中耳炎の方、耳の痛みを感じる方は使用しないでください。
- 鼻の炎症がひどい場合は専門医の指導を受けてください。
- 手術後の方は主治医に相談してください。脳の手術において鼻からの手術操作があった場合、使用できないことがあります。
- 4歳未満のお子様用ではありません。
- 安静にしていないお子様に「ナサリン」を無理に使用しないでください。
- 小さい部品がありますので、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 家族を含め他人と「ナサリン」を使いまわさないでください。
- 薬と併用する場合は、薬をつける前にナサリンを使用してください。

その他

- 「ナサリン」は妊娠期・授乳期でも安全に使用できます。
- 体液に近い食塩水なので痛くありません。

ナサリン用精製塩

精製塩50包入り



- ・1包で体液に近い食塩水が簡単に作れます。
- ・純粋な精製塩のため安全です。
- ・アレルギーを起こしやすいヨウ素・海藻などは含まれていません。



株式会社エントリージャパン

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-12-5 新宿松喜ビル

Tel: 03-5362-3383 / Fax: 03-5369-8330

email: info@entry-japan.com